

Клас V



1. Кариес на кореновата повърхност на зъб 24



2. Завършената подготовка, поставен ретракционен конец



3. Поставен GC Fuji VIII GP цвят А3



4. Окончателното възстановяване покрито с GC Fuji Varnish

Клас III



1. Кариозна лезия на зъби 11 и 21



3. Препариран кавитет клас III



5. Поставен GC Fuji VIII GP цвят А3



2. Същият случай преди лечение



4. Кондициониране с GC Dentin Conditioner за 20 сек.



6. Окончателното възстановяване покрито с GC Fuji Varnish

GC Fuji VIII GP

GC Fuji VIII GP

Физически свойства	Капсула	Прах/течност
Съотношение прах / течност (g/g)	3.4/0.10	3.4/1.0
Време за работа [мин'сек"]	1'30"	1'30"
Общо време за втвърдяване [мин'сек"]	2'10"	2'10"
Якост на натиск: МРа; 1 ден	175	181
Адхезия към емайл (с кондиционер): МРа; 1 ден	11.2	10.7
Адхезия към дентин (с кондиционер): МРа; 1 ден	6.1	5.8
Якост на огъване: 1 ден; МРа	54	52
Якост на усукване: 1 ден; МРа	29	30
Твърдост по Vickers: 1 ден; Hv	53	53
Отделяне на флуор: 1 ден; µg/cm²	55	63



GC Fuji VIII GP капсули

Опаковка от един цвят: 50 капсули  
 Опаковка асорт: 50 капсули, по 10 бр. от А2, А3, А3.5, В2, В3  
 Налични Vita® цветовете: А2, А3, А3.5, В2, В3, С4

GC Fuji VIII GP прах/течност

1-1 опаковка: 15 g прах, 8 g (6.8 ml) течност, мерителна лъжичка, блокче за смесване  
 Допълнително: 8 g (6.8 ml) течност  
 Налични Vita® цветовете: А2, А3, А3.5, В2, В3, С4

\* Vita® е регистрирана търговска марка на Vita® - Zahn-fabrik Bad Säckingen, Germany.

GC EUROPE N.V. Head Office Interleuvenlaan 13 B - 3001 Leuven Tel. +32.16.39.80.50 Fax. +32.16.40.02.14 info@gceurope.com www.gceurope.com

GC EUROPE N.V. GC EEO - Bulgaria София 1174 ул. "Раковски" №79А Тел. +359.2.983.30.30 Моб. +359.888.556.337 Факс +359.2.858.31.37 bulgaria@eoo.gceurope.com www.eoo.gceurope.com



Z O L F B G 2 08 02/07



Понякога и **най-красивата усмивка** се нуждае от **възстановяване: Fuji VIII GP от GC.**

Най-добрата естетика в своя клас: Ново поколение подсилен възстановителен материал с глас-йонерна технология.



# GC Fuji VIII GP

## Ново поколение подсилен възстановителен материал с глас-йономерна технология.

Толкова надежден, че ще го използвате всеки ден.

Добра новина за стоматолозите, които се нуждаят икономичен възстановителен материал за клас III, V и възстановявания по кореновата повърхност: GC Europe представя Fuji VIII GP, химически полимеризиращ, възстановителен материал, базиран върху глас-йономерна технология, с подобрени механични и естетични качества. Лесен за употреба. Бърз. Осигурява надеждна сила на свързване. Материала, който очаквахте.

Знаете от какво се нуждаете: възстановителен материал, който да използвате във фронталната област, който да осигурява успешни клинични резултати и да е лесен за употреба. Днес правилният избор е на лице - GC Fuji VIII GP. Като нова, икономична алтернатива за фронтални възстановявания, GC Fuji VIII GP е най-добрия в своя клас. Всъщност все повече стоматолози в Европа му се доверяват.

Надеждността от която се нуждаете - за години напред.

Изследване, разглеждащо клинични изпитания на възстановявания клас V, публикувано наскоро в Dental Materials\*, заключава, че ГЙЦ са ненадминати по своята клинична ефективност, сравнени с всички поколения адхезиви на пазара. Дори след 5 години, процента на успеваемост остава в рамките на удивителните 84-100% - доказателство, че глас-йономерните са samozалепващи, както са проектирани.

\*Peumans M, Kanumilli P, De Munck J, Van Landuyt K, Lambrechts P, Van Meerbeek B. Clinical effectiveness of contemporary adhesives: A systematic review of current clinical trials. Dent Mater. 2005 Sep;21(9):864-81.

## За начало ще изредим осем добри причини.



Красива естетика

### 1 Красива естетика и истинска транслюцентност

Благодарение на специална формула, съдържаща специфични смоли, GC Fuji VIII GP е първокласен естетичен избор за възстановявания клас V и малки фронтални кавитети. За разлика от останалите химико-полимеризиращи ГЙЦ, GC Fuji VIII GP е достатъчно транслюцентен за фронталната област и пасва съвършено към цветовете по Vita®\*.



Надеждна връзка

### 2 Надеждна връзка

Укрепва вашата увереност в химическата адхезия - обяснете това и на вашите пациенти. GC Fuji VIII GP осигурява здрава, надеждна и истинска химическа адхезия към емайл и дентин.



Маргинално запечатване

### 3 Дълготрайно маргинално запечатване


Какво друго прави за вас впечатляващата сила на свързване? Подпомага дълготрайното запечатване, което предотвратява оцветяването и бактериалното микропросмукване.



Физични свойства

### 4 Отлични физични свойства

За по-малко от 10 минути, GC Fuji VIII GP достига 90% от своите отлични механични качества.

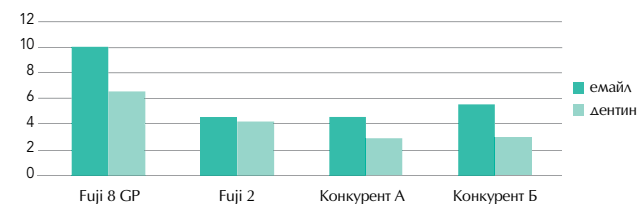

Сила на свързване на GC Fuji VIII и различни само-втъврдяващи подсилени ГЙЦ използвани с кондиционер



Лесен за употреба

### 5 Лесен за употреба

Разработен така че, да остане незасегнат от влагата, GC Fuji VIII GP прави употребата на кофердам ненужна. Ще откриете, че само-втъврдяващия материал се нанася и полимеризира бързо, като елиминира процедурите "чувствителни към техниката". Време за работа: 1'30" Общо време на втъврдяване: 2'10"



Икономичен

### 6 Икономичен

Дали ще изберете прах/течност или версията в капсули, GC Fuji VIII GP ще се смести във вашия бюджет. Не е необходимо ешване и многостъпкови свързващи агенти, което е сериозно предимство, когато пациентите са с ограничени доходи или правите много възстановявания.



Отделяне на флуор

### 7 Всички обичайни качества, които очаквате от ГЙЦ

Както и при останалите глас-йономерни възстановителни материали, GC Fuji VIII GP осигурява отделяне на флуор, отлична биологична съвместимост и добра рентгеноконтрастност.



Идеален партньор

### 8 Идеален партньор за GC Fuji IX GP

GC Fuji VIII GP е перфектното допълнение към GC Fuji IX GP за висококачествени възстановявания във фронталната и дисталната област.



Когато е трудно да се постигне перфектна изолация, а е необходима естетика, GC Fuji VIII е идеалното решение

	Клас I	Клас II	Клас III	Клас V и коренова повърхност	Клас V постериорни	Подложка	Изграждане
GC Fuji VIII GP							
GC Fuji IX GP							