

# GC Temp PRINT™



## Impresoras compatibles

### Impresora (Compañía)

### Longitud de onda (nm)

[PICO2 \(ASIGA\)](#)  
[PICO2 UV \(ASIGA\)](#)



405  
385

[MAX \(ASIGA\)](#)  
[MAX UV \(ASIGA\)](#)



405  
385

[PRO2 \(ASIGA\)](#)  
[PRO2 UV \(ASIGA\)](#)



405  
385

## Máquinas de luz compatibles

### Impresora (Compañía)

### Post-exposición

Labolight DUO (GC)  
Labolight LV-III (GC)  
Otoflash G171

2 x 3 min  
2 x 3 min  
2 x 400 bajo destellos de gas N<sub>2</sub>

## OPTIGLAZE color sobre GC Temp PRINT

### Impresora (Compañía)

### Post-exposición

Labolight DUO (GC)  
Labolight LV-III (GC)  
Otoflash G171

90 s  
5 min  
1000 bajo destellos de gas N<sub>2</sub>

